

Oticon | Get

NÁVOD K POUŽITÍ

CIC / MIC / ITC / ITE



oticon
PEOPLE FIRST

Poděkování

Děkujeme vám, že jste se rozhodli dosáhnout lepšího slyšení pomocí našeho výrobku.

Vynaložili jsme velké úsilí, abyste dosáhli tohoto cíle a ujišťujeme Vás, že Vaše nové sluchadlo obsahuje nejdokonalejší současné technologie dávající mu nejvyšší kvalitu i snadné automatické ovládání.

Vaše nová sluchadla jsou určena k zesílení a přenosu zvuku k vašim uším, a tím se zaslouží o zlepšení vašeho sluchu ve většině situací. Funkce zesílení je individuálně nastavitelná a optimalizovaná pro vaši sluchovou kapacitu podle předpisu vašeho odborníka. Některé funkce vašich sluchadel lze nakonfigurovat podle vašich potřeb. Aktuální konfigurace vašich sluchadel je v příslušných částech tohoto návodu označena (zaškrtnuta) odborníkem. Úplný přehled všech funkcí nakonfigurovaných na sluchadlech je uveden také na poslední stránce. Doporučujeme pozorně pročíst návod, abyste dosáhli maximálního užítku sluchadla.

Máte-li jakékoliv otázky ohledně použití nebo údržby sluchadel, kontaktujte svého odborníka.

Návod k použití

Zamýšleným použitím vašeho sluchadla je zesílení a přenos zvuku do ucha, čímž se dosahuje kompenzace poškození sluchu.

Vaše sluchadlo je určeno ke kompenzaci ztráty sluchu v rozsahu od mírného až k výraznému poškození.

Obsah


Zobrazení sluchadla CIC/MIC	7a
Zobrazení sluchadla ITC	7b
Zobrazení sluchadla ITC Power	7c
Zobrazení sluchadla ITE	7d
Varování	9
První aktivace sluchadla	14
Výměna baterií	15
Při výměně baterií postupujte následovně:	16
Zapnutí a vypnutí sluchadla	17
Označení sluchadla pro pravé a levé ucho	18
Vkládání sluchadel	19
Programy (Volitelné)	20
Ztlumení (volitelné)	22
Ovládání hlasitosti (Volitelné pro ITV a ITC Power)	23
Telefonní cívka (Volitelné)	25
Péče o sluchadla	26
Sedm jednoduchých kroků ke zlepšení sluchu	33
Běžné problémy a jejich řešení	38

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Předtím, než začnete svá sluchadla používat, si prosím prostudujte tento návod. Obsahuje pokyny a důležité informace pro používání sluchadel a baterií.

6

Zobrazení sluchadla CIC/MIC

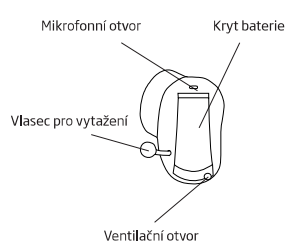


Velikost baterie: 10

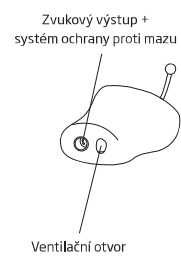

7a

Zobrazení sluchadla ITC

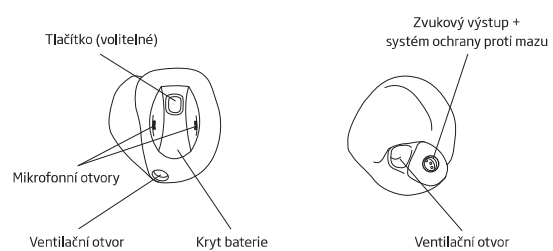


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud sluchadlo nepoužíváte, otevřete kryt baterie úplně, aby mohl cirkulovat vzduch.

Velikost baterie: 312

7b

Zobrazení sluchadla ITC Power

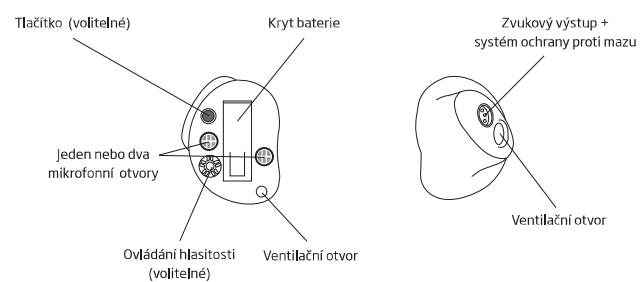

Velikost baterie: 312


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud sluchadlo nepoužíváte, otevřete kryt baterie úplně, aby mohl cirkulovat vzduch.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud sluchadlo nepoužíváte, otevřete kryt baterie úplně, aby mohl cirkulovat vzduch.

Zobrazení sluchadla ITE

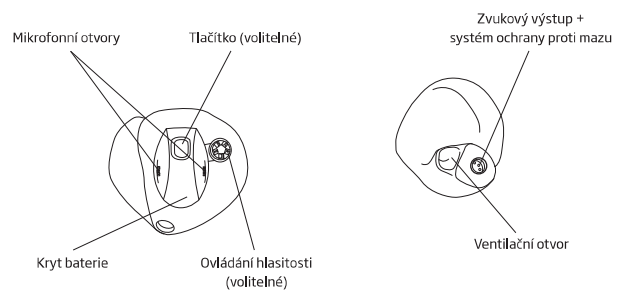

Velikost baterie: 312

Varování

Před použitím sluchadel je potřebné se důkladně seznámit s následujícími obecnými upozorněními:

Použití sluchadel

- Sluchadla by měla být používána pouze podle pokynů. Nesprávné použití může vést k náhlé a trvalé ztrátě sluchu.
- Nikdy neumožňujte jiným lidem nasazovat si vaše sluchadlo, protože by mohlo způsobit trvalé poškození jejich sluchu.

Riziko udušení

- Sluchadla, jejich části a baterie nejsou hračky, a proto je potřeba je uchovávat mimo dosah osob, které by je mohly spolknout, nebo si jimi přivodit nějaké zranění.
- Nikdy neměňte baterii nebo nastavení sluchadel před malými dětmi a osobami s mentálním postižením.
- Vybité baterie odkládejte na takové místo, kde nemohou být nalezeny malými dětmi nebo osobami s mentálním postižením.
- Někdy si mohou uživatelé splést baterie s pilulkami. Léky před spolknutím vždy pečlivě zkontrolujte, aby nedošlo k záměně baterie za léky.

- Nikdy nevkládejte sluchadlo do úst, mohli byste je spolknout.

Použití baterii

- Vždy používejte baterie doporučené vaším odborníkem. Méně kvalitní baterie mohou v případě úniku elektrolytu způsobit tělesné zranění.
- Nikdy se nepokoušejte baterie dobít. Mohou explodovat a způsobit vážné zranění.
- Baterie nikdy nelikvidujte jejich spálením. Existuje zde riziko výbuchu a vážného zranění.

Nefunkčnost sluchadla

- Sluchadla mohou přestat fungovat v případě, když jsou baterie vybité nebo pokud je výstup blokován ušním mazem. Toto berete na vědomí, zejména pokud na funkci sluchadla závisí vaše bezpečnost, například v dopravě apod.

Aktivní implantovaná zařízení

- Krabička na sluchadlo obsahuje magnet. Pokud máte implantované zařízení, např. kardiostimulátor, nenoste krabičku v kapse blízko implantovaného zařízení.

Výbušniny

- Napájecí zdroj ve vašich sluchadlech nemá dostatečnou energii na to, aby mohl za normálních podmínek používání způsobit vznícení. U sluchadel nebyla testována shoda s mezinárodními normami týkajícími se výbušných atmosfér. Sluchadlo doporučujeme nepoužívat v místech s nebezpečím výbuchu.

Rentgen, CT, MR, pozitronová emisní tomografie a elektrolyčba

- Sluchadla si vždy sejměte například před rentgenem, CT / MR / pozitronovou emisní tomografií, elektrolyčbou nebo před operací, protože u sluchadel může v případě vystavení silným polím dojít k poškození.

Možné vedlejší účinky

- Používání sluchadla může způsobit zvýšené hromadění ušního mazu (cerumenu) ve zvukovodu.
- I nealergické materiály by mohly ve výjimečných případech způsobit místní podráždění kůže nebo jiný neobvyklý stav.

Pokud k něčemu takovému dojde, poraďte se s lékařem.

Rušení

Vaše sluchadlo bylo pečlivě testováno z hlediska rušení podle nejpřísnějších mezinárodních norem. Rušení vašeho sluchadla nebo jiných zařízení mohou také způsobovat například některé mobilní telefony, rádiová zařízení v občanském pásmu a poplašná zařízení v obchodech. Pokud k tomu dojde, zvýšte vzdálenost mezi sluchadlem a daným zařízením.

Systém ochrany proti mazu

Nowax:

- Pokud je sluchadlo vybaveno ochranným systémem NoWax, postupujte podle pokynů uvedených v části „Postup výměny filtru NoWax“.

MicroWaxBuster nebo WaxBuster nebo WaxTrap:

- Nikdy se nepokoušejte filtr demontovat nebo vyměnit sami.

Pokud si nejste jisti správnou funkcí filtru, kontaktujte svého dodavatele či odborníka.

První aktivace sluchadla

Sluchadlo je miniaturní elektronické zařízení napájené speciálními bateriemi.
Pro zapínání sluchadla je nutné do bateriové přihrádky vložit novou baterii.

Sluchadlo se aktivuje po zavření krytu baterie. Trvá několik vteřin, než sluchadlo začne vydávat zvuk. Během procesu aktivace sluchadla hraje krátká melodie.
Po zavření krytu baterie si sluchadlo nasadíte.
Pokud budete sluchadlo držet v ruce během procesu aktivace, může z něj vycházet pískavý zvuk. Tento zvuk přestane, když sluchadlo správným způsobem nasadíte na ucho.

14

Výměna baterií


Správná velikost baterie je uvedena v zobrazení sluchadla v první části tohoto dokumentu. Baterie fungují odlišně. Při výběru vysoce kvalitní baterie pro vaše sluchadlo se o pomoc obraťte na svého odborníka.

Vybitá baterie musí být okamžitě vyjmuta ze sluchadla.

Nastane-li čas výměny baterie, 2x zazní zvukový signál (pípnutí). Toto zvukové varování se bude v určitých intervalech opakovat, dokud se baterie nevybíje. Baterie se může vybit krátce po zvukovém varování nebo až za několik hodin.

Když se baterie vybije, sluchadlo se vypne. Po vybití baterie sluchadlo čtyřikrát zapípá, čímž signalizuje nefunkčnost zařízení.

Vyměňte baterii.

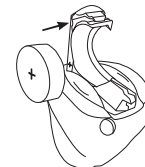


15

Při výměně baterií postupujte následovně:

- Otevřete bateriové pouzdro a vyjměte starou baterii. S baterií lze snadněji manipulovat pomocí magnetu na konci nástroje „MultiTool“.
- Vezměte novou baterii a sejměte ochrannou fólii ze strany „+“.
- Novou baterii můžete vložit použitím magnetického konce víceúčelového nástroje MultiTool. Baterii vložte tak, aby značka „+“ na baterii směřovala ke značce „+“ vytištěné na krytu baterie sluchadla. Zavřete kryt baterie.

Z povrchu baterie je nutné před použitím setřít jakoukoliv případnou vlhkost. Po výměně baterie může několik sekund trvat, než nová baterie začne pracovat naplno.

Pro usnadnění nasazení baterie je k dispozici magnet, umístěný na konci nástroje.

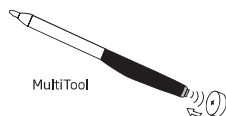

16

Zapnutí a vypnutí sluchadla

Sluchadlo se **ZAPÍNÁ** úplným zavřením krytu baterie, přičemž baterie musí být na svém místě.

Po zavření krytu baterie sluchadlo začne přehrávat krátkou melodii. To znamená, že baterie funguje a přístroj je připraven k provozu.


Vypnutí provedete mírným pootočením krytu baterie.

Pro prodloužení životnosti baterie sluchadlo **vypínejte** vždy, když ho nepoužíváte.

ZAPNUTÍ



VYPNUTÍ

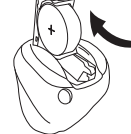

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Když sluchadlo nepoužíváte, zejména v noci nebo při dlouhodobém nepoužívání, otevřete prostor pro baterie úplně, aby mohl cirkulovat vzduch.


17

Označení sluchadla pro pravé a levé ucho

Sluchadla jsou připravena individuálně pro každé ucho. Pokud tedy používáte dvě sluchadla, je vaše sluchadlo pro levé ucho vytvarováno a naprogramováno jinak než sluchadlo pravé. Proto je důležité odlišit levé sluchadlo od pravého.

Pro snadné odlišení levého a pravého sluchadla lze používat barevné značení sluchadla.

Modrý text nebo modré tečky označují LEVÉ sluchadlo.
Červený text nebo červené tečky označují PRAVÉ sluchadlo.

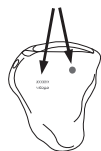


18

Vkládání sluchadel

Špičku sluchadla umístěte do ušního kanálu.

Opatrně zatáhněte za svůj ušní boltec a sluchadlo zatlačte do zvukovodu, v případě nutnosti můžete mírně zakroutit a kopírovat tak přirozené kontury zvukovodu.

Kryt baterie NEPOUŽÍVEJTE jako rukojeť pro vkládání nebo vyjímání sluchadel. Není určen k tomuto účelu.

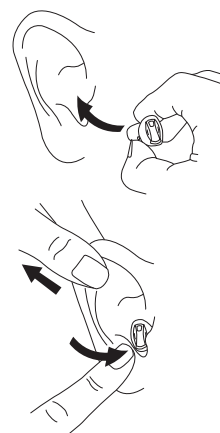

19

Programy (Volitelné)

Vaše sluchadla mohou mít tlačítko pro přepínání mezi různými programy.





Na další program lze přejít krátkým stiskem tlačítka.



20

Vaše sluchadlo může mít až čtyři programy.

Při přepínání mezi programy sluchadlo „pípá“.
Počet pípnutí signalizuje zvolený program.

	Jedno pípnutí - změna na program 1
	Dvě pípnutí - změna na program 2
	Tři pípnutí - změna na program 3
	Čtyři pípnutí - změna na program 4

Dostupné programy jsou uvedeny v Popisu sluchových programů na poslední stránce.

21

Ztlumení (volitelné)

Když potřebujete ztlumit nasazené sluchadlo, použijte režim ztlumení (mute). Sluchadlo se uvádí do režimu ztlumení přidržetím programového tlačítka alespoň 3 sekundy.

Pro zpětnou aktivaci krátce stiskněte programové tlačítko.

STISKNOUT
3 sek.




DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Režim ztlumení nepoužívejte k vypnutí sluchadla, jelikož i v tomto režimu sluchadlo stále vybíjí baterii.

22

Ovládání hlasitosti (Volitelné pro ITV a ITC Power)

Vaše sluchadlo ITE může být vybaveno kruhovým ovládačem hlasitosti. Hlasitost lze ovládat špičkou prstu, plynulým otáčením ovladače oběma směry.

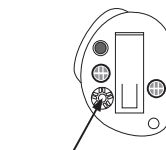

Ovládání hlasitosti



Ovládání hlasitosti

23

Ovládání hlasitosti umožňuje upravit hlasitost v různých situacích na úroveň, která vám vyhovuje.

Chcete-li **zvýšit hlasitost**, otáčejte kolečkem dopředu.
Chcete-li **snižit hlasitost**, otáčejte kolečkem směrem k zátylku.

Po zapnutí má sluchadlo vždy stejnou, preferovanou úroveň hlasitosti.
Změna hlasitosti na tuto úroveň je signalizována dvěma pípnutími.

Telefonní cívka (Volitelné)



Jednotka Telecoil (telefonní cívka) je přijímač pro audio signály vysílané z indukční smyčky. Jednotka Telecoil je určena pro telefonní* hovory nebo indukční smyčky, například v divadlech, kostelech a přednáškových sálech.

Telecoil-telefonní cívka se aktivuje programovým tlačítkem. Po aktivaci uslyšíte několik pípnutí podle příslušného programu telefonní cívky.

Umístění programu pro jednotku Telecoil je popsáno v kapitole „Popis sluchového programu“ na poslední stránce.

**Vyžaduje telefon s vestavěnou telefonní smyčkou. Telefonní smyčka je společný standard pro asistovaný poslech a přenáší zvuk do indukční cívky ve sluchadle.*



Péče o sluchadla

Váš zvukovod produkuje ušní maz, který může ucpat zvukový výstup nebo ventilační kanál sluchadla. Sluchadlo proto může obsahovat filtr nebo jiné zařízení, aby se zabránilo hromadění mazu. Pokyny týkající se konkrétního systému ochrany proti hromadění mazu ve sluchadlech si vyžádejte u svého odborníka.


Při zacházení se sluchadlem ho raději držte nad měkkou podložku pro případ, že by upadlo.

Než půjdete spát:

- Ujistěte se, že v žádném otvoru vaší ušní vložky není maz, protože by mohl snížit výkon sluchadla.
- Otevřete kryt baterie, abyste umožnili cirkulaci vzduchu.

Čištění sluchadla

Pro čištění sluchadel je k dispozici řada samostatných speciálních nástrojů. Nástroj MultiTool by se měl používat pro nejlepší péči o sluchadla a pro dosažení jejich co nejlepšího výkonu.

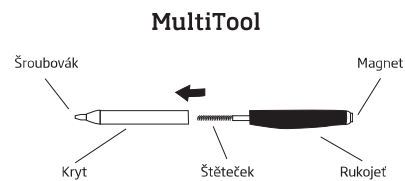



V případě potřeby štěteček vyměňte za nový. Vytáhněte jej z nástroje a vložte nový čistý štěteček. Nový štěteček vsuňte pevně do rukojeti.

Štětečky lze zakoupit u příslušného odborníka.

Používejte MultiTool i na čištění přístroje.

Jak na to...

- Pomocí štětečku odstraňte všechny známky ušního mazu kolem zvukového výstupu.
- Pokud se mikrofonní otvory zanesou prachem nebo nečistotami, bude to mít vliv na výkon sluchadla. Viditelný maz z otvorů opatrně setřete krouživými pohyby kartáčkem.
- Ventilační otvory se čistí protlačením štětečku otvorem za mírného pootáčení.
- Povrch přístroje čistěte utěrkou.

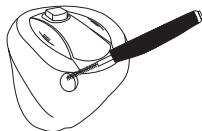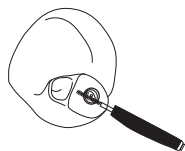


Samotné sluchadlo se nesmí nikdy mýt ani ponořit do vody či jiné tekutiny!

V případě potřeby štěteček vyměňte za nový. Vytáhněte jej z rukojeti a vložte nový čistý kartáček. Nový štěteček vsuňte pevně do rukojeti.

Postup výměny filtru NoWax

1. Vyjměte nástroj z pouzdra. Nástroj má dvě raménka, na jednom je nový filtr a druhé slouží k vyjmutí starého filtru ze sluchadla.
2. Nástroj na vyjmutí filtru zatlačte do stávajícího použitého filtru, který následně vyjměte ze sluchadla.
3. Do sluchadla zatlačte nový filtr.
4. Použitý nástroj vyhoďte.

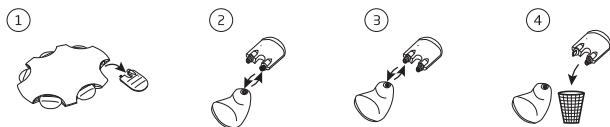

30

Ochrana před horkem, vlhkem a chemikáliemi

Vaše sluchadlo nikdy nesmí být vystaveno extrémnímu horku, například při ponechání sluchadla uvnitř vozidla zaparkovaného na přímém slunci. Nikdy nesmí být vystaveno nadměrné vlhkosti, například v sauně nebo při silném dešti. Nesmí se ani sušit v mikrovlnné troubě nebo v podobných zařízeních.

Jsou-li baterie vlhké, opatrně je otřete, neboť vlhkost může ovlivnit jejich výkon. Těmto problémům můžete zabránit použitím sady proti vlhkosti a můžete tím dokonce prodloužit životnost svého sluchadla. Další podrobnosti si vyžádejte od svého odborníka.

Chemikálie, např. lak na vlasy, parfémy, vody po holení, opalovací krémy a repelenty, mohou sluchadlo poškodit. Před použitím těchto prostředků sluchadlo vždy sejměte a s jeho nasazením vyčkejte, až vyschnou. Pokud používáte krémy, před nasazením sluchadla se ujistěte, zda máte suché ruce.

31

PÉČE O SLUCHADLO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze díly určené pro vaše sluchadlo.

- Sluchadla nepoužívejte, pokud máte v uších nashromážděno nadměrné množství ušního mazu nebo pokud máte ušní infekci.
- Řádnou a pravidelnou péčí o sluchadlo lze prodloužit jeho životnost a zaručit správný výkon.
- Sluchadla nesdílejte s jinými lidmi.
- Před manipulací se sluchadlem si umyjte ruce.

Sedm jednoduchých kroků ke zlepšení sluchu

Během prvních dnů a týdnů používání sluchadel se setkáte se zvuky, které pro vás budou nové, a to zejména, pokud jste předtím sluchadla nenosili. Nyní nastal čas experimentovat s poslechem těchto nových či již dávno zapomenutých zvuků.

1. V klidu domova

Zkuste si zvyknout na veškeré nové zvuky. Naslouchejte různým zvukům v pozadí a zkuste každý zvuk identifikovat. Některé zvuky budou odlišné od těch, na které jste byli zvyklí. Musíte se je opět naučit poznávat. Po čase si na zvuky ve vašem okolí zvyknete – pokud ne, kontaktujte prosím svého odborníka.

Pokud vás sluchadlo unavuje, vypněte jej a odpočiňte si. Postupně budete schopni poslouchat po delší časová období. Postupně se učte poslouchat v delších časových úsecích a brzo budete schopni nosit sluchadlo celý den.

2. Konverzace s jinou osobou

S dalšími osobami se usad'te v klidné místnosti obličejem k sobě. Buďte k sobě čelem, abyste mohli snadno číst výrazy ve tváři. Možná si všimnete nových zvuků v řeči, které se zpočátku mohou zdát poněkud rušivé. Jakmile si však mozek zvykne na nové zvuky v řeči, měli byste řeč slyšet jasněji.

3. Poslech rádia nebo televize

Při poslechu televize nebo rádia začněte poslechem zpráv, protože komentátoři zpráv většinou mluví srozumitelně, a poté zkoušejte jiné televizní programy.

Budete-li mít potíže s poslechem televize nebo rádia, požádejte odborníka o nové nastavení sluchadla nebo doporučení doplňkového zařízení.

4. Společenská konverzace


Při skupinové konverzaci se často stává, že kvalitu slyšení ovlivňuje velké množství rušivých zvuků. V takových situacích se soustřed'te na osobu, se kterou hovoříte. Nepodaří-li se vám zachytit některá slova, požádejte o opakování.

5. Používání jednotky Telecoil v kostele, divadle nebo kině

Stále více sálů divadel a jiných veřejných míst má nyní nainstalovanou indukční smyčku. Tyto systémy vysílají vlny, které zachycuje cívka Telecoil instalovaná ve sluchadle. Indukční smyčky vysílají vlny, které zachycuje telefonní cívka sluchadla. Další podrobnosti si vyžádejte u svého odborníka.

6. Používání telefonu

Při telefonování mějte hranu telefonu lehce na lícní kosti tak, aby zvuk mohl proudit přímo do mikrofonního otvoru sluchadla. Díky tomu sluchadlo nebude pískat a tím si zajistíte ty nejlepší podmínky pro porozumění konverzaci. Máte-li sluchátko telefonu v takové poloze, nezapomeňte hovořit přímo do telefonního mikrofonu, aby vám druhá osoba dobře rozuměla.

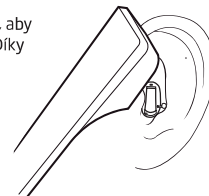

Budete-li mít potíže s používáním telefonu, požádejte odborníka o nové nastavení sluchadla nebo doporučení doplňkového zařízení.

Má-li vaše sluchadlo jednotku Telecoil (a váš telefon má vestavěnou indukční smyčku*), pro další zlepšení příjmu můžete přepnout na vhodný program pro telefonování.

Nezapomeňte, že jednotka Telecoil ve sluchadle může zachytit velké množství rušivých signálů (počítač, fax, televize apod.). Při používání programu pro jednotku Telecoil musíte být ve vzdálenosti alespoň 2 -3 metry od zmiňovaných zařízení.

7. Používání mobilních telefonů

Vaše sluchadlo je navrženo tak, aby vyhovovalo požadavkům elektromagnetické kompatibility IEC (International Electromagnetic Compatibility). Ne všechny telefony však jsou kompatibilní se sluchadly. Odlišné stupně rušení mohou být způsobeny individuálními vlastnostmi vašeho mobilního telefonu.

Pokud se vám zdá, že je používání telefonu k dosažení uspokojivých výsledků obtížné, obraťte se na svého odborníka, který vám poskytne více informací týkajících se dostupného příslušenství.

** Telefonní smyčka je společný standard pro asistovaný poslech a přenáší zvuk do indukční cívky ve sluchadle.*

Celodenní používání sluchadla

Nejlepší způsob, jak zajistit lepší slyšení, je neustále procvičovat poslouchání, dokud nebudete schopni nosit sluchadla pohodlně celý den. Přerušované nebo občasné používání sluchadla v mnoha případech znemožní jeho plné využití.

Sluchadlo vám sluch nevrátí. Nemůže odstranit nebo upravit sluchové postižení v důsledku organických poruch. Co však může udělat, je pomoci vám lépe využít sluchové schopnosti, které máte. Pokud máte dvě sluchadla, měli byste nosit obě.

Běžné problémy a jejich řešení		
Příznak	Možná příčina	Řešení
Žádný zvuk	Opotřebovaná baterie	Vyměňte baterii str. 15
	Zanesený zvukový výstup	Vyčistit zvukový výstup nebo vyměnit filtr NoWax str. 28 a 30
Přerušovaný nebo slabší zvuk	Zanesený zvukový výstup	Vyčistit zvukový výstup nebo vyměnit filtr NoWax str. 28 a 30
	Vlhkost	Otřete baterii a sluchadlo suchou utěrkou str. 31
	Opotřebovaná baterie	Vyměňte baterii str. 15
Pískání hlučnost	Sluchadlo není správně nasazeno	Nasaďte sluchadlo znovu str. 19
	Nahromaděný ušní maz ve zvukovodu	Navštivte svého lékaře

Pokud žádné z výše uvedených řešení problém neřeší, zeptejte se svého odborníka.

Mezinárodní záruka

Na sluchadla Oticon se vztahuje 12měsíční záruční doba ode dne doručení. Tato záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu sluchadel jako takových, nikoliv však příslušenství, jako je např. baterie, hadičky, koncovky, přídavné mikrofony, šňůrky apod.

Problémy způsobené nevhodným používáním nebo péčí, nadměrným používáním, nehodami, opravami provedenými neautorizovanou stranou, vystavením korozi, fyzickými změnami v uších, poškozením cizími předměty vniknutými do zařízení nebo nesprávným nastavením NEJSOU pokryty omezenou zárukou a mohou vést k propadnutí záruky.

Výše zmíněné podmínky záruky se nedotýkají jakýchkoliv zákonných práv, která máte v rámci platné státní legislativy regulující prodej spotřebního zboží. Váš odborník mohl poskytnout záruku, která překračuje podmínky této omezené záruky. Chcete-li získat více informací, obraťte se na svého odborníka.

Pokud potřebujete servis

Zaneste sluchadlo svému odborníkovi, který může být schopen vyřešit drobné problémy a úpravy přímo na místě.

Záruční list

Jméno majitele: _____

Výdejce: _____

Adresa výdejce: _____

Telefon výdejce: _____

Datum nákupu: _____

Záruční doba: _____ Měsíc: _____

Model vlevo: _____ Výrobní č.: _____

Model vpravo: _____ Výrobní č.: _____

Velikost baterie: _____

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dánsko

CE 0543



Odpad z elektronického zařízení je nutno likvidovat v souladu s místními předpisy.

		Sluchadlo			
Levé				Pravé	
<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	Ovládání hlasitosti		<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	Změna programu		<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	Ztlumení		<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Indikátory hlasitosti					
<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp	Zvukový signál při min/max hlasitosti		<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp
<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp	Cvaknutí při změně hlasitosti		<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp
<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp	Zvukový signál při požadované hlasitosti		<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp
Indikátory baterie					
<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp	Signalizace téměř vybité baterie		<input type="checkbox"/> zap	<input type="checkbox"/> vyp

119109CZ/0315

Sluchový program č.	Popis sluchového programu
1	
2	
3	
4	

119109CZ/0315

Lidé nadevše

Naším krédem je „Lidé nadevše“
pomáhat lidem
svobodně komunikovat,
přirozeně reagovat a
aktivně žít



0000119109000001

oticon
PEOPLE FIRST